

CE



Závěsný obal paže

**022**



HANDICAP

Název zdravotnického prostředku

## Závěsný obal paže 022

### URČENÝ ÚČEL

Závěsný obal paže 021 je určen k zavěšení a odlehčení horní končetiny v postavení s flexí lokte při poúrazových a pooperačních stavech v oblasti ramenního kloubu.

### VLASTNOSTI Z HLEDISKA ÚČINNOSTI

Umístěním předloktí do kapsy, zavěšené na popruhu přes rameno, dochází k odlehčení a fixaci horní končetiny.

### INDIKACE

Poúrazové a pooperační stavy vyžadující odlehčení a fixaci v oblasti předloktí a loktu

### KONTRAINDIKACE

Nejsou známy.

### ZBYTKOVÉ RIZIKO

Není známo.

### MATERIÁL

Polyester (PES) 100%

### ČÍLOVÁ SKUPINA PACIENTŮ

Dospělá populace s uvedenou indikací.




### UPOZORNĚNÍ PRO PACIENTA

- Nepřikládejte pomůcku přímo na otevřené rány nebo poškozenou pokožku.
- První nasazení pomůcky by mělo být provedeno za asistence odborníka.
- Správné nasazení je velmi důležité pro funkci pomůcky.
- Nadměrné utažení může negativně ovlivnit prokrvení.
- Pokud se objeví bolest, otok nebo necitlivost, kontaktujte lékaře.
- Velikost je uvedena na balení.

### LIKVIDACE

Doporučujeme jednotlivé části umístit do tříděného odpadu.



Zdravotnický prostředek **MD** je určen pro jednoho pacienta . Skladujte na suchém místě , chráněném před přímým slunečním zářením .




Handicap, a. s.  
Benešov 71, 679 53  
Czech Republic

Závažné nežádoucí příhody, definované ve článku 2 (č. 65) nařízení (EU) 2017/745 (MDR), je třeba nahlásit výrobci a příslušnému úřadu členského státu.

Datum poslední revize: 1.2. 2020


# POKYNY K NASAZENÍ

První použití by mělo být provedeno pod dohledem odborníka

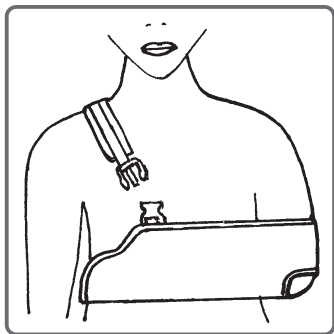

**1**

Rozeptejte sponku.  
Vložte ruku do závěsu  
a přehodte popruh šikmo přes  
záda.

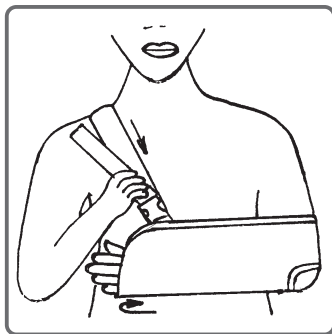

**2**

Zapněte sponku a dotáhněte  
popruh dle potřeby tak, aby  
loket svíral úhel zhruba 90°.  
Zahrňte přední díl látky dle  
potřeby (ortéza by měla končit  
v půlce dlaně)

Před praním zapněte suché zipy.

Výrobek perte nejlépe v ruce nebo v pračce na šetrný program při teplotě 30°.


Výrobek pečlivě vymáchejte, zbytky pracího prostředku mohou způsobit podráždění kůže a vést k rychlejšímu opotřebení materiálu.



# HANDICAP, A. S.

NEJVĚŠTÍ ČESKÝ VÝROBCE A EXPORTÉR  
ORTOPEDICKÝCH POMŮCEK  
NA NÁROČNÉ TRHY EVROPSKÉ UNIE

*Kvalita produkce, neustálý vývoj, zdokonalování výrobních procesů,  
propracovaná výstupní kontrola, vstřícný přístup k zákazníkům.*

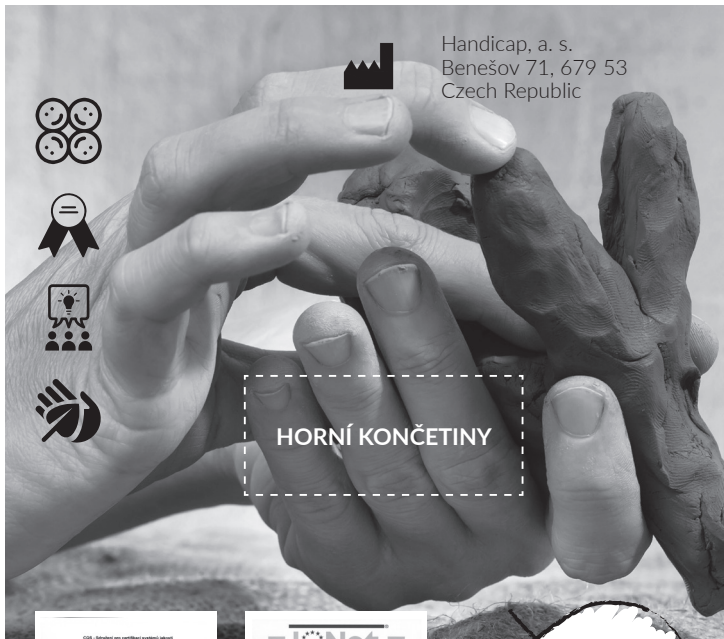

Handicap, a. s.  
Benešov 71, 679 53  
Czech Republic



HORNÍ KONČETINY



ČESKÝ VÝROBEK