



Epikondylární páska

**103**



**HANDICAP**

## Epikondylární páska 103

### URČENÝ ÚČEL

Epikondylární páska 103 je určena ke změně úhlu tahu svalového úponu na epikondyl pažní kosti, vedoucí k odlehčení samotného úponu při přetížení.

### VLASTNOSTI Z HLEDISKA ÚČINNOSTI

Tlak peloty mění úhel tahu svalového úponu na epikondyl lokte, čímž odlehčuje postiženou oblast.

### INDIKACE

Přetížení svalového úponu v oblasti epikondylu lokte.

### KONTRAINDIKACE

Nejsou známy.

### ZBYTKOVÉ RIZIKO

Není známo.

### MATERIÁL

Polyamid (PAD) 45%, polyethylenová (PE) výztuha 40%, bavlna 10%, elastan 5%.

### CÍLOVÁ SKUPINA PACIENTŮ

Dospělá populace s uvedenou indikací.




### UPOZORNĚNÍ PRO PACIENTA

- Nepřikládejte pomůcku přímo na otevřeně rány nebo poškozenou pokožku.
- První nasazení pomůcky by mělo být provedeno za asistence odborníka.
- Správné nasazení je velmi důležité pro funkci pomůcky.
- Nadměrné utažení může negativně ovlivnit prokrvení.
- Pokud se objeví bolest, otok nebo necitlivost, kontaktujte lékaře.
- Velikost je uvedena na balení.

### LIKVIDACE

Doporučujeme jednotlivé části umístit do tříděného odpadu.



Zdravotnický prostředek **MD** je určen pro jednoho pacienta . Skladujte na suchém místě , chráněném před přímým slunečním zářením .




Handicap, a. s.  
Benešov 71, 679 53  
Czech Republic

Závažné nežádoucí příhody, definované ve článku 2 (č. 65) nařízení (EU) 2017/745 (MDR), je třeba nahlásit výrobci a příslušnému úřadu členského státu.

Datum poslední revize: 1.2. 2020


# POKYNY K NASAZENÍ

*První použití by mělo být provedeno pod dohledem odborníka*

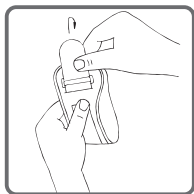

**1**

Zapněte výrobek na co největší obvod.

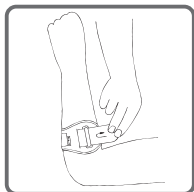

**2**

Vsuňte postiženou končetinu do pomůcky a posuňte výrobek nahoru asi tak 4–6 cm pod loket.



**3**

Položte končetinu na pevnou podložku a dotáhněte pomůcku. Pozor!!! Výstupek v rubové straně musí ležet na bříšku svalu (viz obrázek).

*Před praním zapněte suché zipy.*

*Výrobek perte nejlépe v ruce nebo v pračce na šetrný program při teplotě 30°.*

*Výrobek pečlivě vymáchejte, zbytky pracího prostředku můžou způsobit podráždění kůže a vést k rychlejšímu opotřebení materiálu.*



# HANDICAP, A. S.

NEJVĚŠTÍ ČESKÝ VÝROBCE A EXPORTÉR  
ORTOPEDICKÝCH POMŮCEK  
NA NÁROČNÉ TRHY EVROPSKÉ UNIE

*Kvalita produkce, neustálý vývoj, zdokonalování výrobních procesů,  
propracovaná výstupní kontrola, vstřícný přístup k zákazníkům.*



Handicap, a. s.  
Benešov 71, 679 53  
Czech Republic



HORNÍ KONČETINY



ČESKÝ VÝROBEK