

CE



Zápěstní manžeta
105B



HANDICAP

Název zdravotnického prostředku

Zápěsní manžeta 105B

URČENÝ ÚČEL

Zápěsní manžeta 105B je určena k mírné fixaci zápěstí při přetížení nebo onemocnění v oblasti zápěstí.

VLASTNOSTI Z HLEDISKA ÚČINNOSTI

Udržuje mírnou fixaci v oblasti karpu křížovými tahy ortézy.

INDIKACE

- Lehké distorze zápěstí.
- Bolestivé stavy (artróza, artritida, tenditida).

KONTRAINDIKACE

Nejsou známy.

ZBYTKOVÉ RIZIKO

Není známo.

MATERIÁL

4 mm chloropren (neopren) (90%)
+ polyamid (PAD) 10%.

CÍLOVÁ SKUPINA PACIENTŮ

Dospělá populace s uvedenou indikací.




UPOZORNĚNÍ PRO PACIENTA

- Nepřikládejte pomůcku přímo na otevřené rány nebo poškozenou pokožku.
- První nasazení pomůcky by mělo být provedeno za asistence odborníka.
- Správné nasazení je velmi důležité pro funkci pomůcky.
- Nadměrné utažení může negativně ovlivnit prokrvení.
- Pokud se objeví bolest, otok nebo necitlivost, kontaktujte lékaře.
- Velikost je uvedena na balení.

LIKVIDACE

Doporučujeme jednotlivé části umístit do tříděného odpadu.

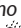

Zdravotnický prostředek **MD** je určen pro jednoho pacienta . Skladujte na suchém místě , chráněném před přímým slunečním zářením .




Handicap, a. s.
Benešov 71, 679 53
Czech Republic

Závažné nežádoucí příhody, definované ve článku 2 (č. 65) nařízení (EU) 2017/745 (MDR), je třeba nahlásit výrobci a příslušnému úřadu členského státu.

Datum poslední revize: 1.2. 2020


POKYNY K NASAZENÍ

První použití by mělo být provedeno pod dohledem odborníka

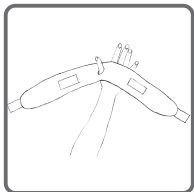


1

Vsuňte palec do otvoru uprostřed ortézy.

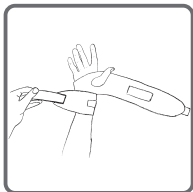

2

Uchopte jeden cíp, obtočte jej kolem zápěstí a zapněte pomocí suchých zipů.

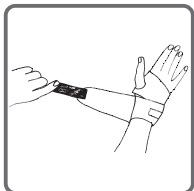

3

Uchopte druhý cíp a opakujte to samé jako v bodu 2 (díl točte těsně pod palcem tak, aby zápěstí bylo co nejvíce fixováno).



4

Zkontrolujte správnou pozici a tlak dotažení.

Před praním zapněte suché zipy.

Výrobek perte nejlépe v ruce nebo v pračce na šetrný program při teplotě 30°.

Výrobek pečlivě vymáchejte, zbytky pracího prostředku můžou způsobit podráždění kůže a vést k rychlejšímu opotřebení materiálu.



HANDICAP, A. S.

NEJVĚŠÍ ČESKÝ VÝROBCE A EXPORTÉR
ORTOPEDICKÝCH POMŮCEK
NA NÁROČNÉ TRHY EVROPSKÉ UNIE

*Kvalita produkce, neustálý vývoj, zdokonalování výrobních procesů,
propracovaná výstupní kontrola, vstřícný přístup k zákazníkům.*



Handicap, a. s.
Benešov 71, 679 53
Czech Republic



HORNÍ KONČETINY



ČESKÝ VÝROBEK