

CE

Stehenní  
bandáž  
**106**



HANDICAP

## Stehenní bandáž 106

### URČENÝ ÚČEL

Stehenní bandáž 106 je určena ke zpevnění a termoterapii oblasti stehna při poúrazových stavech nebo přetížení.

### VLASTNOSTI Z HLEDISKA ÚČINNOSTI

Působí mírnou kompresí stehna a zahřívá postiženou oblast.

### INDIKACE

Měkkotkáňová poranění v oblasti stehna.

### KONTRAINDIKACE

Nejsou známy.

### ZBYTKOVÉ RIZIKO

Není známo.

### MATERIÁL

4 mm chloropren (neopren) (90%)  
+ polyamid (PAD) 10%.

### CÍLOVÁ SKUPINA PACIENTŮ

Dospělá populace s uvedenou indikací.




### UPOZORNĚNÍ PRO PACIENTA

- Nepřikládejte pomůcku přímo na otevřené rány nebo poškozenou pokožku.
- První nasazení pomůcky by mělo být provedeno za asistence odborníka.
- Správné nasazení je velmi důležité pro funkci pomůcky.
- Nadměrné utažení může negativně ovlivnit prokrvení.
- Pokud se objeví bolest, otok nebo necitlivost, kontaktujte lékaře.
- Velikost je uvedena na balení.

### LIKVIDACE

Doporučujeme jednotlivé části umístit do tříděného odpadu.



Zdravotnický prostředek **MD** je určen pro jednoho pacienta . Skladujte na suchém místě , chráněném před přímým slunečním zářením .



Handicap, a. s.  
Benešov 71, 679 53  
Czech Republic

# POKYNY K NAsAZENÍ

*První použití by mělo být provedeno pod dohledem odborníka*



**1**

Natáhněte ortézu na postižené místo tak, aby vyztužená zdvojená část ležela na postiženém místě.

*Výrobek perte nejlépe v ruce nebo v pračce na šetrný program při teplotě 30°.*

*Výrobek pečlivě vymáchejte, zbytky pracího prostředku mohou způsobit podráždění kůže a vést k rychlejšímu opotřebení materiálu.*



# HANDICAP, A. S.

NEJVĚŠTÍ ČESKÝ VÝROBCE A EXPORTÉR  
ORTOPEDICKÝCH POMŮCEK  
NA NÁROČNÉ TRHY EVROPSKÉ UNIE

*Kvalita produkce, neustálý vývoj, zdokonalování výrobních procesů,  
propracovaná výstupní kontrola, vstřícný přístup k zákazníkům.*



Handicap, a. s.  
Benešov 71, 679 53  
Czech Republic

DOLNÍ KONČETINY



ČESKÝ VÝROBEK