

CE



Kyčelní bandáž  
**500**



**HANDICAP**

## Kyčelní bandáž 500

### URČENÝ ÚČEL

Kyčelní bandáž 500 je určena k mírné stabilizaci a kompresi kyčelního kloubu při poúrazových a pooperačních stavech v oblasti kyčelního kloubu.

### VLASTNOSTI Z HLEDISKA ÚČINNOSTI

Působí mírnou stabilizací v kyčelním kloubu bez omezení rozsahu pohybu.

### INDIKACE

- Mírná nestabilita v oblasti kyčelního kloubu.
- Pooperační stavy vyžadující mírnou fixaci kyčelního kloubu.
- Bolestivé stavy v oblasti kyčelního kloubu (trochanterická bursitida, entezopatie gluteálních svalů aj.).

### KONTRAINDIKACE

Nejsou známy.

### ZBYTKOVÉ RIZIKO

Není známo.

### MATERIÁL

Polyuretan (PUR) 50%, polyamid (PAD) 25%, polyester (PES) 20%, Linel 5%.

### CÍLOVÁ SKUPINA PACIENTŮ

Dospělá populace s uvedenou indikací.




### UPOZORNĚNÍ PRO PACIENTA

- Nepřikládejte pomůcku přímo na otevřenou ránu nebo poškozenou pokožku.
- První nasazení pomůcky by mělo být provedeno za asistence odborníka.
- Správné nasazení je velmi důležité pro funkci pomůcky.
- Nadměrné utažení může negativně ovlivnit prokrvení.
- Pokud se objeví bolest, otok nebo necitlivost, kontaktujte lékaře.
- Velikost je uvedena na balení.

### LIKVIDACE

Doporučujeme jednotlivé části umístit do tříděného odpadu.

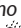

Zdravotnický prostředek **MD** je určen pro jednoho pacienta . Skladujte na suchém místě , chráněném před přímým slunečním zářením .



Handicap, a. s.  
Benešov 71, 679 53  
Czech Republic

# POKYNY K NAsAZENÍ

*První použití by mělo být provedeno pod dohledem odborníka*



**1**

Upravte pomůcku na použití pro pravou, nebo levou nohu. Přepnutím (pinzet) háčků suchého zipu (viz obr 1).



**2**

Obtočte horní konec kolem pánve a zapněte.

Regulujte dotažení (tak, aby bylo pevné, ale zároveň příjemné).



**3**

Spodní volný konec obtočte kolem stehna a zapněte.



**4**

Dle potřeby je možno na bandáž přilepit kapsu na chladicí sáček.

*Před praním zapněte suché zipy.*

*Výrobek perte nejlépe v ruce nebo v pračce na šetrný program při teplotě 30°.*

*Výrobek pečlivě vymáchejte, zbytky pracího prostředku můžou způsobit podráždění kůže a vést k rychlejšímu opotřebení materiálu.*



# HANDICAP, A. S.

NEJVĚŠTÍ ČESKÝ VÝROBCE A EXPORTÉR  
ORTOPEDICKÝCH POMŮCEK  
NA NÁROČNÉ TRHY EVROPSKÉ UNIE

*Kvalita produkce, neustálý vývoj, zdokonalování výrobních procesů,  
proracovaná výstupní kontrola, vstřícný přístup k zákazníkům.*



Handicap, a. s.  
Benešov 71, 679 53  
Czech Republic

DOLNÍ KONČETINY



ČESKÝ VÝROBEK