

CE



Kolenní
ortéza

N101J

s kloubem



HANDICAP

Název zdravotnického prostředku

Kolenní ortéza N101J

URČENÝ ÚČEL

Kolenní ortéza N101J je určena k mírné fixaci kolenního kloubu (zejména mediolaterální) při pooperačních a poúrazových stavech či onemocněních v oblasti kolenního kloubu.

VLASTNOSTI Z HLEDISKA ÚČINNOSTI

Působí mírnou mediolaterální stabilizací v kolenním kloubu bez omezení rozsahu pohybu kolene.

INDIKACE

- Měkkotkáňová poranění kolenního kloubu.
- Doléčení po operaci v oblasti kolene, vyžadující mírnou mediolaterální stabilizaci.
- Doléčení stavů po mírných distorzích a kontuzích kolene.
- Při lehkých degenerativních změnách.

KONTRAINDIKACE

Nejsou známy.

ZBYTKOVÉ RIZIKO

Není známo.

MATERIÁL

4 mm chloropren (neopren) (90%) + polyamid (PAD) 10%.

CÍLOVÁ SKUPINA PACIENTŮ

Dospělá populace s uvedenou indikací.




UPOZORNĚNÍ PRO PACIENTA

- Nepřikládejte pomůcku přímo na otevřené rány nebo poškozenou pokožku.
- První nasazení pomůcky by mělo být provedeno za asistence odborníka.
- Správné nasazení je velmi důležité pro funkci pomůcky.
- Nadměrné utažení může negativně ovlivnit prokrvení.
- Pokud se objeví bolest, otok nebo necitlivost, kontaktujte lékaře.
- Velikost je uvedena na balení.

LIKVIDACE

Doporučujeme jednotlivé části umístit do tříděného odpadu.

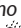

Zdravotnický prostředek **MD** je určen pro jednoho pacienta . Skladujte na suchém místě , chráněném před přímým slunečním zářením .



Handicap, a. s.
Benešov 71, 679 53
Czech Republic

Závažné nežádoucí příhody, definované ve článku 2 (č. 65) nařízení (EU) 2017/745 (MDR), je třeba nahlásit výrobci a příslušnému úřadu členského státu.

Datum poslední revize: 1.2. 2020

POKYNY K NASAZENÍ

První použití by mělo být provedeno pod dohledem odborníka




1

Natáhněte ortézu za horní okraj v oblasti pouzder na klouby tak, aby se česka nacházela ve středu otvoru na přední straně.



2

Zapněte všechny pásky ve správném pořadí, viz obr. 3.

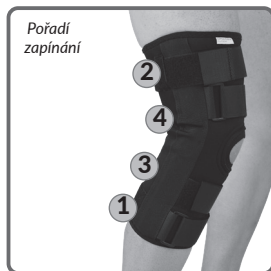

3

Zkontrolujte správné nasazení a případně upravte sílu dotažení pásků.

Před praním zapněte suché zipy.

Výrobek perle nejlépe v ruce nebo v pračce na šetrný program při teplotě 30°.

Výrobek pečlivě vymáchejte, zbytky pracího prostředku můžou způsobit podráždění kůže a vést k rychlejšímu opotřebení materiálu.



HANDICAP, A. S.

NEJVĚŠTÍ ČESKÝ VÝROBCE A EXPORTÉR
ORTOPEDICKÝCH POMŮCEK
NA NÁROČNÉ TRHY EVROPSKÉ UNIE

*Kvalita produkce, neustálý vývoj, zdokonalování výrobních procesů,
proracovaná výstupní kontrola, vstřícný přístup k zákazníkům.*



Handicap, a. s.
Benešov 71, 679 53
Czech Republic

DOLNÍ KONČETINY



ČESKÝ VÝROBEK