

CE



Ramenní bandáž
N24



HANDICAP

Ramenní bandáž N24

URČENÝ ÚČEL

Ramenní bandáž N24 je určena k imobilizaci ramene a odlehčení závěsného aparátu při pooperačních a poúrazových stavech či onemocněních v oblasti ramene.

VLASTNOSTI Z HLEDISKA ÚČINNOSTI

Imobilizuje ramenní kloub v abdukci a mírné vnitřní rotaci.

INDIKACE

- Měkkotkáňová poranění ramenního kloubu (kloubní pouzdro, labrum, vazová poranění).
- Doléčení po repozici luxace glenohumerálního či akromioklavikulárního kloubu.
- Doléčení kostních poranění.
- Pooperační stavy s nutností imobilizace ramenního kloubu v abdukci a mírné vnitřní rotaci.

KONTRAINDIKACE

Nejsou známy.

ZBYTKOVÉ RIZIKO

Nejí známo.

MATERIÁL

Polyuretan (PUR) 60 %, polyamid (PAD) 20 %, bavlna 15 %, polyester (PES) 5%

CÍLOVÁ SKUPINA PACIENTŮ

Dospělá populace s uvedenou indikací.




UPOZORNĚNÍ PRO PACIENTA

- Nepřikládejte pomůcku přímo na otevřené rány nebo poškozenou pokožku.
- První nasazení pomůcky by mělo být provedeno za asistence odborníka.
- Správné nasazení je velmi důležité pro funkci pomůcky.
- Nadměrné utažení může negativně ovlivnit prokrvení.
- Pokud se objeví bolest, otok nebo necitlivost, kontaktujte lékaře.
- Velikost je uvedena na balení.

LIKVIDACE

Doporučujeme jednotlivé části umístit do tříděného odpadu.

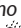

Zdravotnický prostředek **MD** je určen pro jednoho pacienta . Skladujte na suchém místě , chráněném před přímým slunečním zářením .



Handicap, a. s.
Benešov 71, 679 53
Czech Republic

Závažné nežádoucí příhody, definované ve článku 2 (č. 65) nařízení (EU) 2017/745 (MDR), je třeba nahlásit výrobci a příslušnému úřadu členského státu.

Datum poslední revize: 1.2. 2020

POKYNY K NAsAZENÍ

První použití by mělo být provedeno pod dohledem odborníka



1

Natáhněte díl A na předloktí postižené dolní končetiny. Zapněte popruhy vpředu dílu A.



2

Zádové popruhy ved'te křížem přes záda.



3

Dílem B fixujte postiženou paži k trupu. Loket by měl svírat úhel 90°.

Před praním zapněte suché zipy.

Výrobek perte nejlépe v ruce nebo v pračce na šetrný program při teplotě 30°.

Výrobek pečlivě vymáchejte, zbytky pracího prostředku můžou způsobit podráždění kůže a vést k rychlejšímu opotřebení materiálu.



HANDICAP, A. S.

NEJVĚŠÍ ČESKÝ VÝROBCE A EXPORTÉR
ORTOPEDICKÝCH POMŮCEK
NA NÁROČNÉ TRHY EVROPSKÉ UNIE

*Kvalita produkce, neustálý vývoj, zdokonalování výrobních procesů,
propracovaná výstupní kontrola, vstřícný přístup k zákazníkům.*



Handicap, a. s.
Benešov 71, 679 53
Czech Republic



HORNÍ KONČETINY



ČESKÝ VÝROBEK